

FICHE TECHNIQUE PATIENT

INTRA-CONDUIT (ITC) RECHARGEABLE



evolv^{AI}

SOLUTION AUDITIVE CONNECTÉE



L'ITC R Evolv AI s'alimente avec une batterie Lithium rechargeable. Réalisé sur-mesure d'après l'empreinte de l'oreille, il se loge dans le conduit auditif. C'est le compromis idéal entre le contour d'oreille et l'intra dans le cas d'une perte auditive assez importante. L'avantage de l'intra-conduit est de proposer une amplification suffisante pour équiper des pertes auditives allant de moyennes à sévères. Bénéficiant de la plus récente technologie sans-fil, il est doté de la dernière puce Thrive avec capteurs intégrés et l'intelligence artificielle, compatible avec les smartphones et des accessoires sans-fil pour converser au téléphone, écouter de la musique ou la télévision et autres medias.



ITC R EVOLV AI 2400 - PREMIUM+ ★★★★★

ITC R EVOLV AI 2000 - PREMIUM ★★★

ITC R EVOLV AI 1600 - AVANCÉE ★★

LPP Classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		2400	2000	1600	AVANTAGES
PERFORMANCES	Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	Niveau technologique très hautement performant. Doté de 24 canaux et 24 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une résolution sonore haute définition. Offre d'excellentes performances et une souplesse de transition optimum dans toutes sortes d'environnements sonores y compris les plus bruyants et complexes.
	Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16	Le bouton-poussoir permet de régler le volume et de changer les programmes.
	Bouton-poussoir multifonction	●	●	●	L'ITC R se recharge avec un chargeur qui se branche sur le secteur. Doté d'une batterie intégrée, le chargeur permet d'assurer trois chargements complets de vos aides auditives (sans être branché au secteur) et de savoir qu'elles resteront toujours chargées où que vous soyez.
	Technologie sans-fil Thrive 2.4 GHz	24 heures	24 heures	24 heures	Le premier chiffre correspond au degré de protection contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.
	Autonomie de la batterie	24 heures	24 heures	24 heures	
	Indice de protection (IP)	IP57	IP57	IP57	
CONNECTIVITÉ					
Application Thive	pour les utilisateurs	●	●	●	L'application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à gérer votre santé et accéder à des informations utiles.
Application Care	pour les aidants	●			Vous partagez des informations utiles telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions sociales avec les personnes de votre choix.
IMPORTANT : Les applications Thrive Hearing Control et Thrive Care permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquérir vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site https://www.starkey.fr/aides-auditives/applications/thrive-hearing-control/compatibilite					
PERFORMANCES AUDITIVES	Voice AI	●			Votre iPhone est utilisé comme microphone à distance et grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, vous bénéficiez d'une amélioration du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans le bruit.
	Mode Edge : Contrôle tactile	●			Avec le Mode Edge, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Celui-ci scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin d'un simple tapotement sur votre oreille (Contrôle tactile) ou via l'application Thrive Hearing Control.
	NOUVEAU Mode Edge : Accès Appli Thrive	●	●	●	Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.
	Streaming audio direct	●	●	●	Vous appuyez sur la touche de votre smartphone pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone + est requis pour certains appareils Android.
	Appels téléphoniques	●	●	●	Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad*, vous permettant de converser simplement en mains libres.
	NOUVEAU Audio bidirectionnel	●	●	●	Permet de redécouvrir la musique.
	Optimisation de la musique	●●●●	●●	●	
GESTION DU BRUIT	Réduction du bruit	●	●	●	Garantit une qualité sonore maximale, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements très bruyants avec une réduction du bruit jusqu'à 40 % par rapport à la version précédente.
	Localisation dans l'espace	●	●	●	Localise précisément la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores difficiles.
	Synchronisation d'oreille à oreille	●	●	●	Garantit un son haute définition pour offrir une expérience auditive plus naturelle.
	Directionnel (en option) Microphones directionnels	●	●	●	Optimise les performances dans des environnements hautement complexes et relativement bruyants. S'adapte en continu dans tous les canaux afin que vous puissiez participer aux conversations et mieux entendre de toutes parts.
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SONORE	Musique automatique	●●●●	●●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément. Vous aurez un plaisir d'écoute dans tous les environnements bruyants et complexes.
	Silence	●●●●	●●	●	
	Autres catégories	●	●	●	Amélioration spatiale de la parole, Bruits mécaniques, Paroles dans le bruit, Bruit transitoire, Vent
ASSISTANT INTELLIGENT THRIVE	Traduction	●			Communication avec des interlocuteurs qui parlent une langue étrangère grâce à l'outil de traduction.
	Transcription audio texte	●	●		Les conversations sont retranscrites en texte afin que vous puissiez lire ce qui est dit.
	Assistant Thrive	●	●	●	Posez vos questions et obtenez des réponses sur de nombreux sujets.
	Trouver mon téléphone	●	●	●	Permet de localiser votre smartphone si celui-ci est égaré ou perdu. Tapotez 2 fois sur votre aide auditive et dites «Trouver mon téléphone».
	TeleHear Service téléaudiologie	●	●	●	Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.
	Engagement & Suivi d'activité	●	●	●	Le nombre de pas réalisés chaque jour, les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).
	Détection et alertes de chute	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts prédéfinis.
	Rappels vocaux	●	●	●	Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.
	Auto On/Off	●	●	●	Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.
	Contrôle tactile	●	●	●	Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES	Self Check	●	●	●	Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.
	Annulateur de larsen	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.
	Générateur de bruit anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex	●	●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)
COMPATIBILITÉ AVEC DES ACCESSOIRES SANS-FIL :					
Mini Microphone / Microphone de table / Télécommande		●	●	●	Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources média Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.

* Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces [5e génération], iPad Pro 11 pouces [3e génération], iPad Air [4e génération] et iPad [6e génération].

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.